

מגיני עור הניתנים לעיצוב

בטכנולוגיית מולדבל

הוראות שימוש:

יש לנקות את העור מסביב לסטומה עם מים פושרים וסבון נטול שומן. יש לשטוף את האזור וליבש בטפיחות עדינות. **אין להסיר את הציפוי השקוף מהאזור הדביק או את הנייר הלבן המכסה את השוליים הלבנים של מגן העור בזמן פעולת ה"עיצוב"** (ההתאמה לסטומה).



1 כדי למדוד את קוטר הסטומה שלך יש להחזיק את מגן העור מעל לסטומה. דרך הציפוי השקוף ניתן לראות את גודל וצורת הסטומה לצורך פתיחה מתאימה ומספקת של הפתח.



2 כדי להתחיל בפעולת העיצוב, יש למקם את האגודלים במרכז הפתח ולהתחיל לגלגל את האזור הדביק כלפי חוץ עד לגודל ולצורה המתאימה לסטומה שלך.

הערה: אין להשתמש במספריים במוצר זה.



3 לאחר עיצוב הפתח לגודל הסטומה שלך, יש להסיר את הציפוי השקוף ממגן העור ולהניח את הפתח במרכז מעל הסטומה במקום המיועד. יש להצמיד את שאר האזור הדביק לעור שצמוד לסטומה.



4 יש להשתמש באצבעות כדי לגלגל את הפתח חזרה אל דפנות הסטומה. וליצור התאמה מדויקת ועדינה לסטומה. טכנולוגיית זיכרון הריבאונד הייחודית למגן עור זה, תסייע גם היא ליצירת ההתאמה המושלמת על ידי מילוי המרווחים שנותרו.



5 ברגע שהושגה ההתאמה הרצויה, יש להדק את הצווארון שנוצר מסביב לסטומה. יש לחזור על פעולה זו מסביב לכל היקף הסטומה. מומלץ להצמיד את מגן העור ולהחזיקו במקומו במשך 30 שניות נוספות כדי להבטיח את ההדבקה.



6 יש להסיר את הנייר הלבן המצפה את השוליים הלבנים של מגן העור ולהצמידם לעור על ידי החלקת השוליים כדי למנוע קפלים.



7 חיבור השקית:

לפני חיבור השקית למגן העור, יש להפריד את שולי השקית בעדינות על מנת לאפשר כניסת מעט אוויר לשקית.



8 יש להניח את טבעת הפלסטיק של השקית מול הטבעת שעל מגן העור ולהחליק תור כדי לחיצה את שתי הטבעות ביחד מלמטה כלפי מעלה, עד שנשמעים מספר קליקים.



טיפול בשוליים ההידרוקולואידיים הלבנים של מגן העור בזמן השימוש: שולי המדבקה עשויים להתרומם מעט במגע עם מים. במקרה זה יש לייבש את השוליים שהתרוממו ולהצמידם חזרה למקום. יש להימנע ממגע השוליים עם משחות ושמינים.

הסרת מגן העור: יש להניח יד אחת על העור וביד השנייה לקלף בעדינות את מגן העור. מומלץ להיעזר במגבוני הסרה מסוג קונבק'ייר.

לייעוץ והדרכה 1-800-800-150 (שיחת חינם)



מפיצת מוצרי



פרמצבטיקל בע"מ

www.philtel.co.il